

# 山东省临床检验中心

## 2024 年糖化血红蛋白（HbA1c%）室间质量评价活动须知

2024 年山东省临床检验中心组织全省临床实验室开展糖化血红蛋白（HbA1c%）室间质量评价活动，全年共进行 2 次活动，共 10 个批号，全年一次邮寄。有关内容说明如下：

### 一、测定时间及样品批号

次数	样品批号	数量	测定日期	截止日期	成绩反馈
第一次	240911~15	5 瓶	3 月 19 日	3 月 25 日	4 月 9 日
第二次	240921~25	5 瓶	9 月 18 日	9 月 24 日	10 月 21 日

### 二、评价项目

糖化血红蛋白（HbA1c%）计 1 项。

### 三、样品接收及处理

1、实验室收到室间质评样品后，请根据本实验室申请表中填写的参评项目认真检查核对样品种类、数量及编号，如有破损、缺失或编号错误，请于**3 月 13 日前**登录山东省临床检验中心网站，在【室间质评信息】栏目下，点击【样本接收状态确认（补寄）】，按照相应流程申请补寄。**务必严格按照流程申请，扫描二维码在线申请，同时发送《补寄申请表》，否则可能导致无法补寄。**

2、质评样本为冻干态，全年 10 个批号，一次性下发，收到质评样本后，请置于 2~8℃条件下保存，有效期 24 个月。

3、测定前将样品从要求储存环境取出，放置室温（18~25℃）平衡至少 30 分钟，按要求加入 0.5mL 纯化水溶解后，轻轻颠倒数次，使其充分混匀，不要振摇，避免产生气泡；小心开启瓶盖，进行检测。样品复溶后在 2~8℃密封保存可稳定 7 天。

4、**将样品等同于临床样本进行检测**，按有潜在生物传染性样本对待，并根据相关规定使用及处理。

### 四、结果回报：

1、使用 Web 方式传递室间质评信息。具体结果回报方法请查看《2024 年山东省医疗机构临床实验室室间质量评价计划》中“六、基于 Web 的室间质量评价方式”。

2、**报告结果时必须填写检测方法、试剂、仪器等信息**，请在回报表相应位置的下拉菜单

中选择对应编码。

**3、请务必在规定时间内上报检测结果。**填写结果和编码时，请仔细审核后发送，提示发送成功后，**必须到已上报数据栏进行结果的确认。**

**4、参评实验室必须严肃认真对待每一次室间质量评价活动，不允许串通或伪造结果，一经发现，对参加者的能力评定为不合格。**

#### **五、联系方式**

**如果参加室间质评单位遇到与质评有关的问题，请与临检中心质评室联系。**

地址：济南市历下区经十路 9677 号山东省立医院东院区诚和楼 505

电话：0531-87906016

邮箱：sdccleqa@163.com、sdccloffice@163.com

**山东省临床检验中心**

**2024 年 2 月 26 日**

# 山东省临床检验中心

## \_\_\_\_年糖化血红蛋白（HbA1c%）能力验证（室间质评）结果回报表

单位名称：

测定日期：

联系电话：

实验室负责人：

实验操作人员：

项目名称	单位	测定结果					测定方法	试剂厂家	仪器型号	校准物厂家
		_____1	_____2	_____3	_____4	_____5				
HbA1c%	mmol/L									